



LIFE CLEAN



Mini guide

Sjukhus, Tandläkare & Kliniker

- **Ytdesinfektion**
- **Redo att användas**
- **2 minuters kontakttid**

Kan användas för desinficering på t.ex:

- Sängskenor
- Alarmknapp
- Telefoner
- Fjärrkontroller
- Infusionspump / stativ
- Toalett / toalettstol
- Sängbord
- Strömbrytare
- Dörrhandtag
- Andnings- och annan sängustrustning
- Tangentbord
- Stolar
- Skärmgardin
- Semi-kritiska instrument



Norovirus | *Clostridium difficile* | MRSA | ESBL

För fullständig lista se Microbiological Efficacy Summary.



Se på videon



LIFECLEAN

HEALTHCARE

www.lifeclean.se

LIFE CLEAN

HEALTHCARE

Hur man applicerar



1. Öppna flaskan och skriv öppningsdatumet på flaskan.



2. Låt LifeClean verka i 2 minuter. Skölj / torka vid behov, följ alltid de lokala riktlinjerna. Vid kontakt med metallytor, skölj eller torka efter kontakttiden.



Obs! Smutsiga ytor ska alltid rengöras före applicering av LifeClean Desinfektion.



Tips! Placera verktyget i en behållare med LifeClean. Om verktyget inte kan blötläggas med LifeClean, applicera LifeClean direkt på verktyget.

För information om personlig hantering, hållbarhet och materialkompatibilitet, se aktuellt säkerhetsdatablad.

Öppnad flaska hållbar i 4 veckor och en oöppnad flaska hållbar i 9 månader.

Appliceringstekniker



LifeClean flaska
& microfiberduk



LifeClean flaska
med spraymun-
stycke



Elektrostatisk
spray (handhål-
len/ryggsäck)

